

# INSTRUCCIONES

## Fibra de refuerzo Ribbond® Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM Ribbond Original, Ribbond-Triaxial

### Contenido:

**Los kits de inicio de Ribbond contienen:**

Fibra de refuerzo Ribbond y tijeras.

Las tijeras Ribbond sólo están destinadas a cortar la fibra Ribbond.

Las tijeras no están destinadas a otros fines.

**Los kits de recambio de Ribbond contienen:**

Fibra de refuerzo Ribbond

**Declaración de uso:** Ribbond refuerza las resinas dentales.

**Requisitos de manipulación:** Antes de aplicar la resina, no tocar Ribbond con las manos o guantes de látex. Manipular Ribbond con pinzas, alicates o guantes de algodón.

Después de aplicar la resina, manipular Ribbond como la resina (instrumentos o guantes sin polvo).

**Adherir Ribbond al composite:** Humedecer Ribbond con un adhesivo sin relleno. Introducir Ribbond dentro de un composite con relleno sin polimerizar.

**Adhesión de Ribbond al acrílico:** Humedecer Ribbond con una mezcla suelta de líquido y polvo. Introducir Ribbond dentro de acrílico sin polimerizar.

**Pulido de Ribbond:** La fibra de refuerzo no se pule. Recubra Ribbond con un composite o acrílico.

**Eliminación:** No hay consideraciones especiales.

## Sólo para uso profesional

**Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon**

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond Inc.  
1904 Third Ave Suite 330  
Seattle, WA 98101 USA  
Tel: 206-340-8870, [ribbond@ribbond.com](mailto:ribbond@ribbond.com)  
[www.ribbond.com](http://www.ribbond.com)



European Representative:  
Sigma Dental Systems  
Heideland 22  
D-24976 Handewitt  
Germany