



Οδηγίες για τη συγκολλούμενη ενισχυτική ταινία Ribbond® Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM Original Ribbond, Ribbond-Triaxial



Περιγραφή:

Οι συγκολλούμενες ίνες ενίσχυσης Ribbond κατασκευάζονται από πολύ υψηλού μοριακού βάρους ίνες πολυαιθυλαίνιου και επεξεργάζονται με ψυχρό αέριο πλάσμα για την βελτίωση της συγκόλλησης με ρητίνες.

Σκοπός:

Το Ribbond ενισχύει τις οδοντιατρικές ρητίνες.

Δήλωση του προοριζόμενου σκοπού:

Δημοφιλείς χρήσεις του Ribbond συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση ναρθοκοποιήσεων και γεφυρών με ρητίνη. Στην ΕΕ, το Ribbond είναι εγκεκριμένο για την τοποθέτηση επάνω ή μέσα στην αδαμαντίνη.

Μεταχείριση:

Μην αγγίζετε την ταινία Ribbond με τα χέρια ή με γάντια λάτεξ, πριν την διαβρέξετε με ρητίνη. Να χειρίζεστε την ταινία Ribbond με λαβίδα, πένσα ή βαμβακερά γάντια.

Μετά την εφαρμογή της ρητίνης, μεταχειρίζεστε την ταινία Ribbond όπως τη ρητίνη (με εργαλεία ή με γάντια χωρίς πουδρά).

Αποθήκευση:

Σφραγίστε την συσκευασία της ταινίας Ribbond με έναν συνδετήρα μετά το άνοιγμα, για να διατηρηθεί η συγκολλητική της ιδιότητα.

Συγκόλληση του Ribbond σε ρητίνη:

Διαβρέξτε το Ribbond με μία συγκολλητική ρητίνη χωρίς ενισχυτικές ουσίες η οποία δεν περιέχει primers οδοντίνης ή αδροποιητικούς παράγοντες.

Συγκόλληση της Ribbond σε ακρυλικό:

Διαβρέξτε τη Ribbond με ένα χαλαρό μίγμα υγρού και σκόνης. Ενσωματώστε τη Ribbond μέσα στο απολυμέριστο ακρυλικό.

Γυάλισμα της Ribbond:

Δεν σπιλβώνονται οι ίνες ενίσχυσης. Καλύπτει τη Ribbond με σύνθετη ρητίνη με ενισχυτικές ουσίες ή ακρυλικό.

Απόρριψη:

Χωρίς ειδική μεταχείριση

Περιεχόμενο

Τα αρχικά σετ Ribbond περιέχουν:

Συγκολλούμενη ενισχυτική ταινία Ribbond® και ψαλίδι.

Το ψαλίδι της Ribbond χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κοπή της ταινίας Ribbond.

Το ψαλίδι δεν ενδείκνυται για άλλη χρήση.

Τα σετ αναπλήρωσης Ribbond περιέχουν:

Συγκολλούμενη ενισχυτική ταινία Ribbond®.

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό στην Ribbond, Inc και στην αρμόδια αρχή.

www.ribbon.com

Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第 5 9 2 2 7 7 0 号




Ribbond Inc.
1904 Third Ave Suite 330
Seattle, WA 98101 USA
Tel: 206-340-8870, ribbon@ribbon.com
www.ribbon.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany

Ναρθηκοποιήσεις:

1. **Μετρήστε την ποσότητα Ribbond η οποία απαιτείται.** Χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα ή αλουμινόχαρτο για να δημιουργήσετε ένα υπόδειγμα.
2. **Κόψτε το Ribbond.** Χειριστείτε το με μεταλλική λαβίδα.
3. **Παρασκευάστε τα δόντια για την συγκόλληση,** τοποθετήστε το συγκολλητικό παράγοντα και φωτοπολυμερίστε.
4. **Διαβρέξτε το Ribbond με συγκολλητική ρητίνη.** Χρησιμοποιήστε συγκολλητικό παράγοντα χωρίς ενισχυτικές ουσίες ο οποίος δεν περιέχει primers οδοντίνης ή αδροποιητικούς παράγοντες. [1]
5. **Τοποθετήστε σύνθετη ρητίνη στα δόντια.** Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα μέτριας ρευστότητας σύνθετης ρητίνης με ενισχυτικές ουσίες στο ύψος των σημείων επαφής. [2]
6. **Πιέστε το Ribbond το οποίο έχει διαβραχεί μέσα στην ρητίνη.** [3-5]
7. **Αφαιρέστε τις περίσσειες της ρητίνης και φωτοπολυμερίστε.** [6]
8. **Καλύψτε το Ribbond με λεπτόρρευστη ρητίνη και φωτοπολυμερίστε.** Δεν στιλβώνονται οι ίνες ενίσχυσης. Λειάνετε την ρητίνη πριν τον φωτοπολυμερισμό.

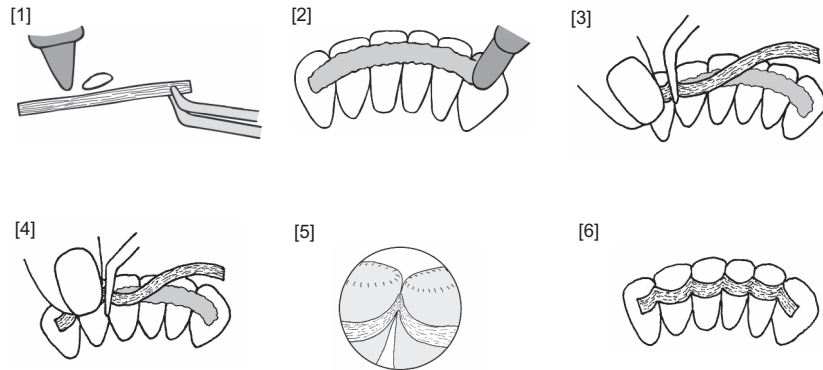

Γέφυρες:

1. **Μετρήστε την ποσότητα Ribbond η οποία απαιτείται.** Χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα ή αλουμινόχαρτο για να δημιουργήσετε ένα υπόδειγμα.
2. **Κόψτε το Ribbond.** Χειριστείτε το με μεταλλική λαβίδα.
3. **Παρασκευάστε τα δόντια για την συγκόλληση,** τοποθετήστε τον συγκολλητικό παράγοντα και φωτοπολυμερίστε..
4. **Διαβρέξτε το Ribbond με συγκολλητική ρητίνη.** Χρησιμοποιήστε συγκολλητικό παράγοντα χωρίς ενισχυτικές ουσίες ο οποίος δεν περιέχει primers οδοντίνης ή αδροποιητικούς παράγοντες. [1]
5. **Τοποθετήστε σύνθετη ρητίνη στα δόντια.** Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα μέτριας ρευστότητας σύνθετης ρητίνης με ενισχυτικές ουσίες στο ύψος των σημείων επαφής. [2]
6. **Πιέστε το Ribbond το οποίο έχει διαβραχεί μέσα στην ρητίνη.** [3-6]
7. **Αφαιρέστε τις περίσσειες της ρητίνης και φωτοπολυμερίστε.**
8. **Προσθέστε ένα δεύτερο στρώμα Ribbond στην περιοχή του τεχνητού δοντιού.**
 - a. **Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα** μέτριας ρευστότητας σύνθετης ρητίνης με ενισχυτικές ουσίες στην γλωσσική / υπερώια πλευρά του φωτοπολυμερισμένου Ribbond και επάνω στις μεσοδόντιες γωνίες των στηριγμάτων. [7]
 - b. **Διαβρέξτε το Ribbond** με ρητίνη και τοποθετήστε το μέσα στην απολυμέριστη ρητίνη. [8-9]
 - c. **Αφαιρέστε την περίσσεια ρητίνη και φωτοπολυμερίστε.**
9. **Χτίστε το τεχνητό δόντι.** Κτίστε με ρητίνη ή χρησιμοποιήστε το φυσικό δόντι του ασθενούς.
10. **Καλύψτε το Ribbond** με λεπτόρρευστη ρητίνη και φωτοπολυμερίστε. Δεν στιλβώνονται οι ίνες ενίσχυσης. Λειάνετε την ρητίνη πριν τον φωτοπολυμερισμό.

